


Instructivo de toma de muestra

Es importante que el animal no haya comido nada al menos una hora antes de la toma de muestra.

No toque la punta del cepillo con las manos.

No permita que muestras de los distintos animales estén en contacto.

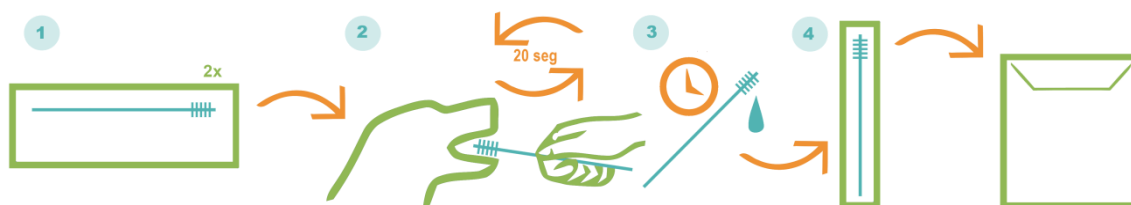

1. Con cada kit de toma de muestra usted recibirá 2 cepillos. Debe tomar dos muestras de cada animal a ser muestreado.
2. Coloque el cepillo en la boca del animal sobre la encía (entre los labios y los dientes). Mueva el cepillo sobre la superficie sin lastimar durante 20 segundos.
3. Deje secar el cepillo.
4. Devuelva al cepillo a su embalaje y envíelo a Dogma Genetics.

Si tiene dudas comuníquese al 099 984080

